

PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA

El resultado del test de aliento TAU-KIT se verá afectado por todos los tratamientos que interfieran con el status del *Helicobacter pylori* o con su actividad ureasa. Por tanto, el test se realizará:

- ☑ Al menos 4 semanas después de haber terminado una terapia antibiótica sistémica, especialmente si se trata de antibioterapia para la erradicación de *H. pylori*.
- ☑ Al menos 2 semanas después de la última dosis de agentes antisecretores ácidos, como inhibidores de la bomba de protones (p.ej. omeprazol), y fármacos antiulcerosos (p.ej. sales de bismuto).
- ☑ En ayunas durante al menos 6 horas antes de la prueba, preferiblemente desde la noche anterior.
- ☑ Sin fumar al menos durante las 6 horas previas y durante la prueba.
- ☑ En reposo: abstenerse de realizar ejercicio físico antes y durante la prueba.
- ☑ Si el paciente vomita durante la realización de la prueba, necesitando ser repetida, no podrá realizarla antes del día siguiente en ayunas.

